

ZEIZBERG

Carbon made to move.

Hoja informativa de viaje:

Viajar en avión con su silla de ruedas eléctrica





Su silla de ruedas Reizberg está ***made to move*** — en el día a día y también durante los viajes.

Esta hoja informativa de viaje resume lo que es importante antes de volar con su silla de ruedas: desde la reserva hasta la llegada. Le ayuda a tener claros los siguientes pasos, para que pueda centrarse en lo más importante: ***estar en movimiento.***

Contenido

Antes de su vuelo	Página 2
Su reserva	Página 3
Información sobre la batería para viajes en avión	Página 4
Consejos prácticos para el viaje	Página 5
En el aeropuerto	Página 6
Después del aterrizaje	Página 7
Lista de comprobación para su viaje en avión	Página 8
Área de descargas	Página 9
Contacto	Página 12

*Prevalecen los requisitos de la aerolínea y del aeropuerto, así como la información incluida en el manual de instrucciones de su silla de ruedas Reizberg.

Antes de su vuelo



Dentro de la UE, su silla de ruedas se transporta generalmente sin coste adicional. Para que la aerolínea y el aeropuerto puedan preparar bien la facturación, el embarque y la llegada, las aerolíneas utilizan información fija y códigos de asistencia estándar.

Puede indicar estos códigos al realizar su reserva. En muchos casos, hay un campo específico durante el proceso de reserva. Si no hay ninguna selección disponible, la información correspondiente puede confirmarse directamente con la aerolínea.

WCHR

Desplazamientos por el aeropuerto

Puede desplazarse de forma independiente en distancias cortas dentro del aeropuerto. Para distancias más largas dentro del aeropuerto, se proporciona asistencia. Puede utilizar de forma independiente el autobús de pista y las escaleras del avión.

WCHS

Embarque y salida del avión

Se proporciona asistencia para desplazarse por el aeropuerto, así como para embarcar y salir del avión. No se utilizan escaleras para acceder al avión.

WCHC

Hasta su asiento en el avión

Se proporciona asistencia en el aeropuerto hasta su asiento en el avión. Si es necesario, también puede facilitarse una silla de ruedas de a bordo dentro de la cabina.

Su reserva



Para la reserva, normalmente solo se requieren algunos datos. Tenga preparados el nombre del modelo, las dimensiones, el peso y la información sobre la batería. Las aerolíneas suelen solicitar esta información durante el proceso de reserva o poco después.

ruedas Reizberg. El documento MSDS y el certificado IATA/de la aerolínea están disponibles en el área de descargas.

Compruebe también los requisitos de la aerolínea y prevea suficiente tiempo para las escalas.

Puede encontrar los datos técnicos en el manual de instrucciones de su silla de

Datos técnicos de un vistazo:

Parámetro	Valor o indicación	Valor o indicación
Modelo	RX3	RX7
Peso sin batería	11,6 kg	15,8 kg
Peso con batería	13,3 kg	17,0 kg
Dimensiones desplegada	920 × 620 × 870 mm	970 × 610 × 930 mm
Dimensiones plegada	730 × 250 × 700 mm	610 × 340 × 760 mm
Batería	24 V, 10 Ah	24 V, 10 Ah
Peso máximo del usuario	120 kg	136 kg

Información sobre la batería para viajes en avión



Las baterías de iones de litio extraíbles deben llevarse en el equipaje de mano durante los viajes en avión. Antes de la salida, se retiran de la silla de ruedas, se embalan de forma segura y se preparan para el transporte. Esto permite que los pasos importantes para viajar con su batería sean claros y fáciles de seguir.

Solución práctica de Reizberg:

Nuestras baterías están equipadas con tapas protectoras para proteger los contactos. Esto protege los contactos contra cortocircuitos durante el transporte. Facilita la preparación del viaje y ofrece una solución sencilla y segura al volar.

Relevante para Reizberg:

Una batería Reizberg de 240 Wh se encuentra dentro del límite permitido para una batería extraída. Llevar una segunda batería puede superar este límite. Si desea viajar con una batería adicional, le recomendamos confirmar previamente su transporte directamente con la aerolínea.



Consejos prácticos para el viaje



Utilice la bolsa de transporte suministrada para mantener su silla de ruedas Reizberg bien protegida durante el viaje. La pequeña bolsa extraíble es adecuada para baterías y piezas sueltas que desee llevar consigo

en el equipaje de mano. Así, las piezas importantes permanecen juntas, fácilmente accesibles y bien protegidas.



En el aeropuerto



En el aeropuerto, hay algunos pasos establecidos antes de la salida. Preséntese en el mostrador de facturación o en el punto de asistencia y tenga preparados los documentos más importantes. Dependiendo del aeropuerto, su silla de ruedas podrá entregarse en el mostrador de equipaje especial o en una fase posterior. Las baterías extraíbles y los accesorios

sueltos deben llevarse en el equipaje de mano.

Si su silla de ruedas se entrega antes del embarque, el resto del proceso hasta la puerta de embarque seguirá los procedimientos del aeropuerto y de la aerolínea.



Después del aterrizaje



Después del aterrizaje, su silla de ruedas Reizberg le será devuelta en la puerta de embarque, junto al avión o en la zona de equipaje especial, dependiendo del aeropuerto. Compruebe la silla de ruedas y los accesorios inmediatamente después de recibirlos.

Si las baterías o las piezas sueltas se transportaron por separado, pueden volver a colocarse o fijarse una vez que le hayan devuelto la silla de ruedas. Esto permite que su silla de ruedas esté rápidamente lista de nuevo para continuar el viaje.



Carbon made to move

Para caminos que
llevan más lejos.



Aviso legal

No se acepta ninguna responsabilidad por errores de impresión. Salvo errores u omisiones. Las posibles diferencias de color se deben a los procesos de impresión. Todas las dimensiones son aproximadas. Las imágenes pueden mostrar detalles de equipamiento que pueden variar según el modelo o la versión.

2

