

ZEIZBERG

Elektorollstuhl RX3

Bluetooth-Fernbedienung

Ergänzende Kurzanleitung
zur Gebrauchsanweisung

Mitgeltendes Dokument:
Gebrauchsanweisung
Elektorollstuhl RX3

Deutsch



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	2
2	Produktbeschreibung.....	3
2.1	Hauptsteuergerät des Elektrorollstuhls RX3.....	3
2.2	Bluetooth-Fernbedienung.....	4
3	Sicherheit.....	5
3.1	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	5
3.2	Sicherheit bei Nutzung durch eine Begleitperson.....	5
3.3	Verbindungsstörungen.....	6
4	Bluetooth-Fernbedienung koppeln.....	7
4.1	Voraussetzungen.....	7
4.2	Kopplung durchführen.....	8
5	Bedienung.....	12
5.1	Elektrorollstuhl RX3 mit der Bluetooth-Fernbedienung steuern.....	12
5.2	Geschwindigkeit einstellen.....	12
5.3	Hupe verwenden.....	13
5.4	Bluetooth-Fernbedienung ausschalten.....	13
6	Fehlerbehebung.....	14
7	Batterien der Bluetooth-Fernbedienung wechseln.....	15
8	Reinigung und Lagerung.....	16
9	Entsorgung.....	17

1 Einleitung

Diese ergänzende Kurzanleitung beschreibt die Kopplung und Bedienung der Bluetooth-Fernbedienung für den Elektrorollstuhl RX3.

Die Bluetooth-Fernbedienung ist ein zusätzliches kabelloses Bedienelement. Die Hauptsteuerung des Elektrorollstuhls RX3 erfolgt weiterhin über das fest installierte Hauptsteuergerät mit Steuerknüppel.

Die vollständige Gebrauchsanweisung des Elektrorollstuhls RX3 ist weiterhin zu beachten. In der RX3-Gebrauchsanweisung ist beschrieben, dass der Elektrorollstuhl über das Hauptsteuergerät bedient wird und dass dieses unter anderem Ein-/Ausschalter, Hupe, Beleuchtung, Geschwindigkeitstasten und Steuerknüppel umfasst.



HINWEIS

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die vollständige Gebrauchsanweisung des Elektrorollstuhls RX3. Lesen und beachten Sie vor der Verwendung der Bluetooth-Fernbedienung die vollständige Gebrauchsanweisung des Elektrorollstuhls RX3.

2 Produktbeschreibung

2.1 Hauptsteuergerät des Elektrorollstuhls RX3

Der Elektrorollstuhl RX3 wird grundsätzlich über das fest installierte Hauptsteuergerät bedient.

Das Hauptsteuergerät dient zum Ein- und Ausschalten des Elektrorollstuhls RX3, zur Anzeige von Informationen und zur Steuerung der Fahrbewegung über den Steuerknüppel. Über die Funktionstasten können unter anderem die Hupe betätigt und die maximale Geschwindigkeit erhöht oder reduziert werden.

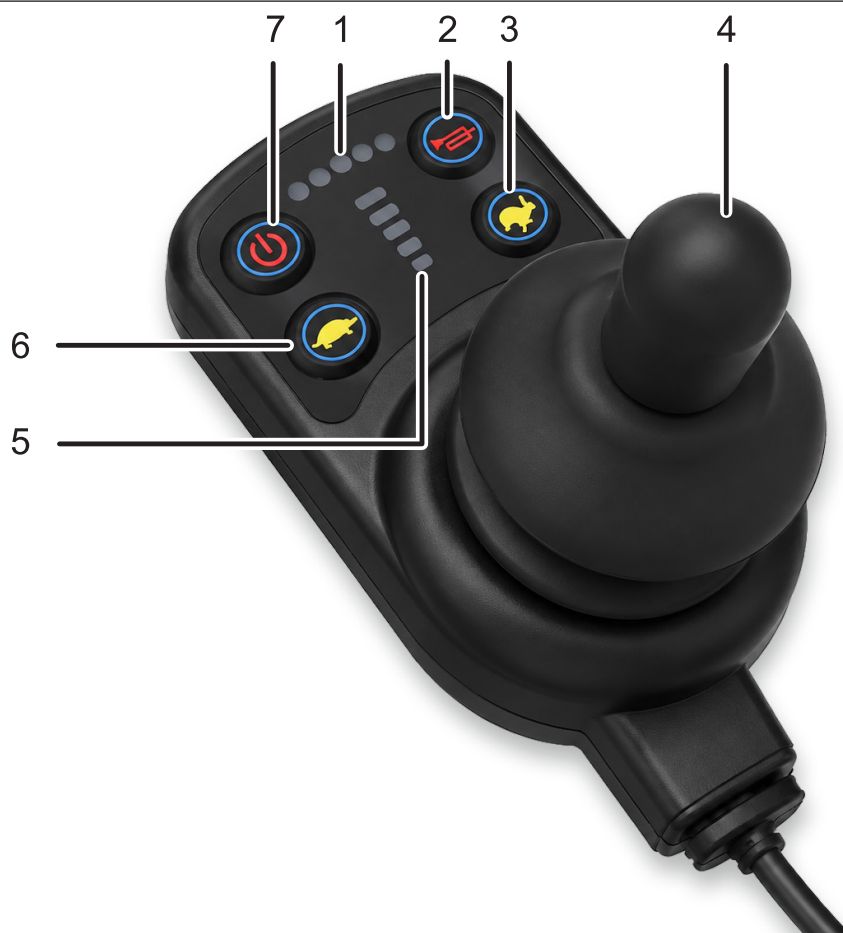


Abbildung 1: Steuergerät

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 LED-Anzeige Ladezustand des Akkus | 5 LED-Anzeige Geschwindigkeitsstufe |
| 2 Hupentaste | 6 Taste Geschwindigkeitsstufe reduzieren |
| 3 Taste Geschwindigkeitsstufe erhöhen | 7 Ein-/Ausschalter |
| 4 Steuerknüppel | |



HINWEIS

Für die Kopplung der Bluetooth-Fernbedienung werden am Hauptsteuergerät insbesondere die Taste „Geschwindigkeitsstufe reduzieren“ (6), die Hupentaste (2) und der Ein-/Ausschalter (7) benötigt.

22 Bluetooth-Fernbedienung

Die Bluetooth-Fernbedienung dient zur kabellosen Steuerung ausgewählter Funktionen des Elektrorollstuhls RX3.

Nach erfolgreicher Kopplung können Richtung und Geschwindigkeit des Elektrorollstuhls RX3 über die Bluetooth-Fernbedienung gesteuert werden.

Die Bluetooth-Fernbedienung wird in der Hand gehalten. Sie ist nicht fest am Elektrorollstuhl montiert.

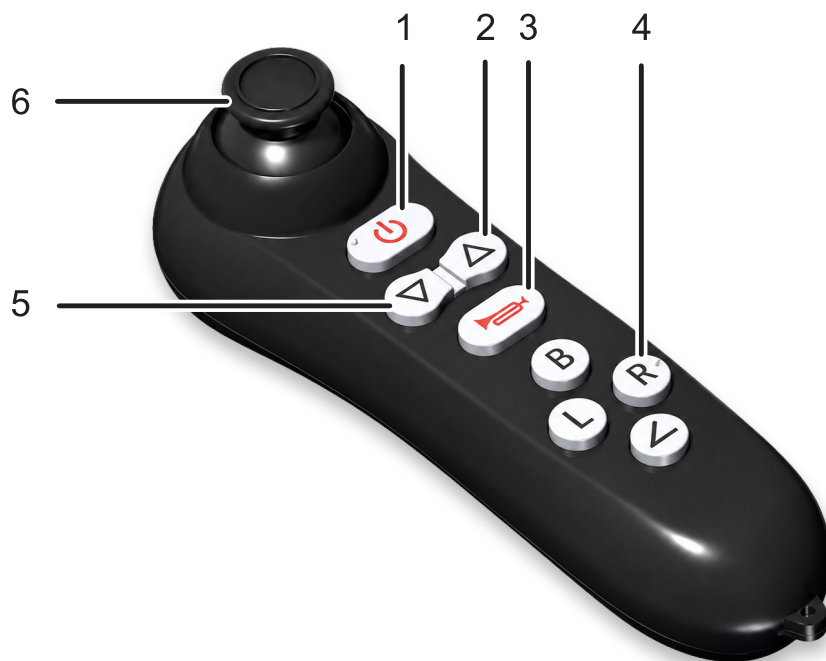


Abbildung 2: Bluetooth-Fernbedienung

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 Ein-/Aus Taste | 5 Geschwindigkeit reduzieren |
| 2 Geschwindigkeit erhöhen | 6 Steuerknüppel |
| 3 Hupentaste | |
| 4 Weitere Tasten, z. B. B / L / R / Fold
(nicht anwendbar für RX3) | |



HINWEIS

Die Bluetooth-Fernbedienung ist als universelle Fernbedienung ausgeführt. Einzelne Tasten können je nach Produktmodell unterschiedliche Funktionen haben oder ohne Funktion sein. Beim Elektrorollstuhl RX3 sind nur die in dieser Kurzanleitung beschriebenen Funktionen freigegeben.

3 Sicherheit

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Bewegung

Nach der Kopplung kann der Elektrorollstuhl RX3 über die Bluetooth-Fernbedienung bewegt werden. Eine unbeabsichtigte Betätigung kann zu Kollisionen, Stürzen oder Verletzungen führen.

- Verwenden Sie die Bluetooth-Fernbedienung nur, wenn Sie den gesamten Fahrbereich überblicken können.
 - Halten Sie ausreichend Abstand zu Personen, Tieren, Möbeln, Wänden, Türen, Treppen, Rampen und Bordsteinkanten.
 - Bewahren Sie die Bluetooth-Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Legen Sie die Bluetooth-Fernbedienung nicht so ab, dass Tasten unbeabsichtigt gedrückt werden können.
 - Schalten Sie den Elektrorollstuhl RX3 aus, wenn die Bluetooth-Fernbedienung nicht verwendet wird.
-

3.2 Sicherheit bei Nutzung durch eine Begleitperson

Die Bluetooth-Fernbedienung kann durch eine Begleitperson verwendet werden, um den Elektrorollstuhl RX3 kontrolliert zu bewegen.



WARNUNG

Kollisions- und Sturzgefahr bei Nutzung durch eine Begleitperson

Bei der Bedienung über die Bluetooth-Fernbedienung kann sich das Fahrgefühl vom Bedienen über das Hauptsteuergerät unterscheiden. Besonders bei kleinen Unebenheiten besteht die Gefahr, dass Bewegungen des Elektrorollstuhls falsch eingeschätzt werden.

- Die Begleitperson sollte die Bluetooth-Fernbedienung mit einer Hand halten.
 - Mit der anderen Hand sollte die Begleitperson den Elektrorollstuhl RX3 am Schiebegriff oder Rahmen festhalten.
 - Verwenden Sie die Bluetooth-Fernbedienung nur mit niedriger Geschwindigkeit.
 - Stellen Sie die Geschwindigkeit bei Verwendung der Bluetooth-Fernbedienung maximal auf Stufe 2 ein.
 - Verwenden Sie die Bluetooth-Fernbedienung nur auf ebenem, trockenem und freiem Untergrund.
 - Verwenden Sie die Bluetooth-Fernbedienung nicht auf Treppen, Bordsteinkanten, Rampen, starken Steigungen oder unebenem Untergrund.
 - Reduzieren Sie die Geschwindigkeit beim Rangieren, Rückwärtsfahren und in engen Bereichen.
 - Verwenden Sie die Bluetooth-Fernbedienung nicht, wenn der Elektrorollstuhl RX3 verzögert oder unregelmäßig reagiert.
-



HINWEIS

Das Festhalten des Elektrorollstuhls RX3 mit einer Hand unterstützt ein besseres Gefühl für die Bewegung des Rollstuhls, insbesondere beim Rangieren oder bei kleinen Unebenheiten.

3.3 Verbindungsstörungen

**HINWEIS**

Bluetooth ist eine Funkverbindung. Mobiltelefone, Funkgeräte, WLAN-Router oder andere Funkquellen können die Verbindung beeinflussen. Die RX3-Gebrauchsanweisung weist darauf hin, dass Bluetooth-Geräte und andere Funkquellen elektromagnetische Störungen verursachen können.

Verwenden Sie die Bluetooth-Fernbedienung nicht weiter, wenn:

- die Verbindung instabil ist,
- der Elektrorollstuhl RX3 verzögert reagiert,
- der Elektrorollstuhl RX3 unregelmäßig reagiert,
- die Bluetooth-Fernbedienung nicht eindeutig auf Eingaben reagiert.

Schalten Sie den Elektrorollstuhl RX3 in diesem Fall aus und verwenden Sie das Hauptsteuergerät.

4 Bluetooth-Fernbedienung koppeln

Die Bluetooth-Fernbedienung muss vor der ersten Verwendung mit dem Hauptsteuergerät des Elektrorollstuhls RX3 gekoppelt werden.

4.1 Voraussetzungen

Vor der Kopplung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der Elektrorollstuhl RX3 steht auf ebenem, freiem Untergrund.
- Es befinden sich keine Personen, Tiere oder Hindernisse im Fahrbereich.
- Die Bluetooth-Fernbedienung befindet sich in der Nähe des Hauptsteuergeräts.
- Die Batterien der Bluetooth-Fernbedienung sind ausreichend geladen.
- Die Bremshebel befinden sich im automatischen Betrieb A. Der automatische Betrieb wird in der RX3-Gebrauchsanweisung als Betriebsart beschrieben, bei der die elektronische Steuerung aktiv ist und die elektromagnetische Bremse beim Loslassen des Steuerknüppels aktiviert wird.



VORSICHT

Unerwartete Bewegung bei der Funktionsprüfung

Nach erfolgreicher Kopplung kann der Elektrorollstuhl RX3 über die Bluetooth-Fernbedienung bewegt werden.

- Prüfen Sie die Funktion zunächst mit niedriger Geschwindigkeit.
 - Stellen Sie die Geschwindigkeit maximal auf Stufe 2 ein.
 - Testen Sie die Bluetooth-Fernbedienung vorzugsweise ohne sitzende Person oder mit besonderer Vorsicht in einer freien, ebenen Umgebung.
-

42 Kopplung durchführen



Abbildung 3: Hauptsteuergerät und Bluetooth-Fernbedienung während der Kopplung

Gehen Sie wie folgt vor, um die Bluetooth-Fernbedienung mit dem Elektrorollstuhl RX3 zu koppeln:



1. Schalten Sie den Elektrorollstuhl RX3 über das Hauptsteuergerät ein.
→ Die Anzeige am Hauptsteuergerät leuchtet auf.



2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste der Bluetooth-Fernbedienung gedrückt, bis die Bluetooth-Fernbedienung eingeschaltet ist.
→ Die Kontrollleuchte der Bluetooth-Fernbedienung leuchtet grün.



3. Halten Sie auf der Bluetooth-Fernbedienung die Taste „Geschwindigkeit reduzieren“ gedrückt.
→ Die Ein-/Aus-Taste der Bluetooth-Fernbedienung leuchtet rot und blinkt.
4. Lassen Sie die Taste los, sobald die rote Kontrollleuchte blinkt.
5. Legen Sie die Bluetooth-Fernbedienung kurz beiseite.



6. Halten Sie am Hauptsteuergerät die Taste „Geschwindigkeitsstufe reduzieren“ gedrückt.
→ Das Bluetooth-Symbol am Hauptsteuergerät beginnt zu blinken.



7. Sobald das Bluetooth-Symbol am Hauptsteuergerät blinkt, drücken Sie zügig die Hupentaste am Hauptsteuergerät.
→ Das Hauptsteuergerät schaltet sich automatisch aus.



8. Nehmen Sie die Bluetooth-Fernbedienung wieder zur Hand.
9. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste der Bluetooth-Fernbedienung.
→ Die Kontrollleuchte der Bluetooth-Fernbedienung leuchtet grün.

10. Schalten Sie das Hauptsteuergerät des Elektrorollstuhls RX3 wieder ein.



11. Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das Bluetooth-Symbol am Hauptsteuergerät angezeigt wird und die Bluetooth-Fernbedienung auf Eingaben reagiert.
12. Prüfen Sie die Funktion der Bluetooth-Fernbedienung vorsichtig in sicherer Umgebung.



5 Bedienung

5.1 Elektrorollstuhl RX3 mit der Bluetooth-Fernbedienung steuern

Nach erfolgreicher Kopplung können Richtung und Geschwindigkeit des Elektrorollstuhls RX3 über die Bluetooth-Fernbedienung gesteuert werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass der Elektrorollstuhl RX3 eingeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Fernbedienung eingeschaltet und gekoppelt ist.
3. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Tiere oder Hindernisse im Fahrbereich befinden.
4. Stellen Sie die Geschwindigkeit auf maximal Stufe 2 ein.
5. Halten Sie die Bluetooth-Fernbedienung mit einer Hand.
6. Halten Sie den Elektrorollstuhl RX3 mit der anderen Hand am Schiebegriff oder Rahmen fest.
7. Bewegen Sie den Steuerknüppel vorsichtig in die gewünschte Fahrtrichtung.
8. Lassen Sie den Steuerknüppel los, um die Bewegung zu stoppen.
9. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit beim Rangieren, Rückwärtsfahren und in engen Bereichen.

Die RX3-Gebrauchsanweisung beschreibt für die normale Steuerung über den Steuerknüppel, dass der Steuerknüppel zur Vorwärtsfahrt, Rückwärtsfahrt und Richtungssteuerung verwendet wird und dass die Bewegung durch Zurückführen in die senkrechte Position reduziert und gestoppt wird.

5.2 Geschwindigkeit einstellen

- Drücken Sie „Geschwindigkeit erhöhen“, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
- Drücken Sie „Geschwindigkeit reduzieren“, um die Geschwindigkeit zu reduzieren.



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch zu hohe Geschwindigkeit

Für eine sichere Begleitung und einen kontrollierten Transport der sitzenden Person darf die Geschwindigkeit bei Verwendung der Bluetooth-Fernbedienung maximal auf Stufe 2 eingestellt sein.

- Verwenden Sie die Bluetooth-Fernbedienung nur mit niedriger Geschwindigkeit.
- Reduzieren Sie die Geschwindigkeit vor Kurven, beim Rückwärtsfahren und in engen Bereichen.
- Passen Sie die Geschwindigkeit stets an Umgebung und Untergrund an.

5.3 Hupe verwenden

Drücken Sie die Hupentaste auf der Bluetooth-Fernbedienung, um ein akustisches Warnsignal auszulösen.



HINWEIS

Die Hupe ersetzt nicht die Pflicht, den Fahrbereich vollständig zu prüfen und auf Personen, Tiere und Hindernisse zu achten.

5.4 Bluetooth-Fernbedienung ausschalten

1. Bringen Sie den Elektrorollstuhl RX3 vollständig zum Stillstand.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste der Bluetooth-Fernbedienung.
→ Die Bluetooth-Fernbedienung ist ausgeschaltet.



HINWEIS

Die Bluetooth-Fernbedienung schaltet sich nach ca. 3 Minuten ohne Bedienung automatisch aus.

6 Fehlerbehebung

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahme
Bluetooth-Fernbedienung schaltet sich nicht ein	Batterien leer oder falsch eingesetzt	Batterien prüfen oder wechseln
Kopplung funktioniert nicht	Bluetooth-Fernbedienung nicht im Kopplungsmodus	Kopplung erneut durchführen
Bluetooth-Symbol erscheint nicht	Kopplung nicht abgeschlossen	Hauptsteuergerät aus- und wieder einschalten, Kopplung wiederholen
Elektorollstuhl RX3 reagiert verzögert	Verbindung instabil / Funkstörung	Bluetooth-Fernbedienung nicht weiter verwenden
Elektorollstuhl RX3 reagiert nicht	Verbindung unterbrochen / Batterien schwach	Batterien prüfen, erneut koppeln
Ungewöhnliches Fahrverhalten	Störung der Steuerung	Elektorollstuhl RX3 ausschalten und Fachhändler kontaktieren



WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Störung der Steuerung

Wenn der Elektorollstuhl RX3 verzögert, unregelmäßig oder unerwartet reagiert:

- Verwenden Sie die Bluetooth-Fernbedienung nicht weiter.
- Stoppen Sie den Elektorollstuhl RX3, wenn möglich.
- Schalten Sie den Elektorollstuhl RX3 über das Hauptsteuergerät aus.
- Wenden Sie sich an den Fachhändler, wenn das Problem weiterhin besteht.

In der RX3-Gebrauchsanweisung ist ebenfalls vorgesehen, den Elektorollstuhl bei Störungen anzuhalten, auszuschalten und bei fortbestehendem Problem den Händler zu kontaktieren.

7 Batterien der Bluetooth-Fernbedienung wechseln

Wechseln Sie die Batterien, wenn:

- die Bluetooth-Fernbedienung nicht eingeschaltet werden kann,
- die Kontrollleuchte nicht leuchtet,
- die Reichweite abnimmt,
- die Verbindung instabil wird,
- der Elektrorollstuhl RX3 verzögert reagiert.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Bluetooth-Fernbedienung aus.
2. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Bluetooth-Fernbedienung.
3. Entnehmen Sie die leeren Batterien.
4. Setzen Sie neue AAA-Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierung ein.
5. Schließen Sie das Batteriefach.
6. Prüfen Sie die Funktion der Bluetooth-Fernbedienung in sicherer Umgebung.



HINWEIS

Beschädigung durch falsch eingesetzte Batterien

- Beachten Sie die Polaritätsmarkierung im Batteriefach.
 - Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
 - Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen zusammen.
 - Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtverwendung.
-

8 Reinigung und Lagerung

Reinigen Sie die Bluetooth-Fernbedienung mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch.



HINWEIS

Beschädigung durch Feuchtigkeit

- Reinigen Sie die Bluetooth-Fernbedienung nicht mit Wasser.
- Tauchen Sie die Bluetooth-Fernbedienung nicht in Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Lagern Sie die Bluetooth-Fernbedienung trocken, staubgeschützt und außerhalb der Reichweite von Kindern.


9 Entsorgung

Entsorgen Sie die Bluetooth-Fernbedienung und Batterien entsprechend den geltenden lokalen Vorschriften.



HINWEIS

Bluetooth-Fernbedienung und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien über geeignete Sammelstellen und elektronische Komponenten über zugelassene Entsorgungsstellen.

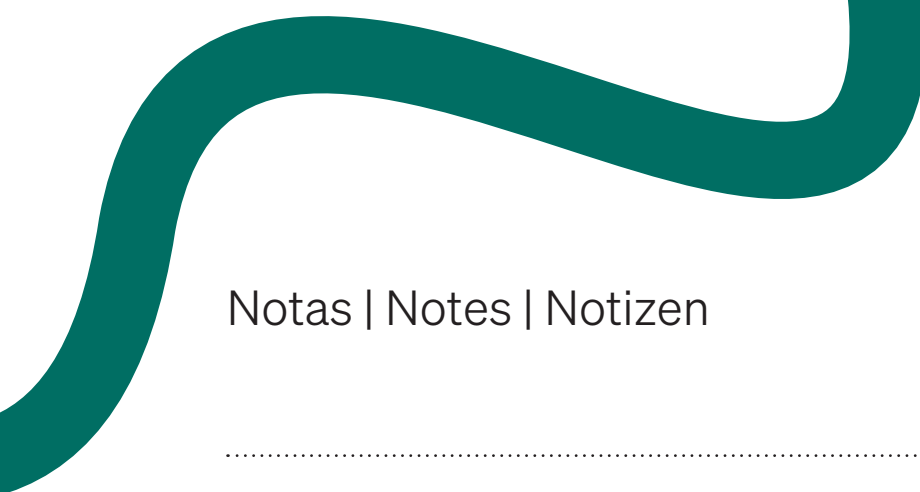

Notas | Notes | Notizen



Diese ergänzende Anleitung gilt für die Bluetooth-Fernbedienung in Verbindung mit dem Elektrorollstuhl RX3.

Der Elektrorollstuhl RX3 ist als Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 eingestuft.

*Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.*

Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

*Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Näherungswerte.*