

ZEIZBERG

Silla de ruedas eléctrica RX3

Mando a distancia Bluetooth

Instrucciones de uso complementarias

Documento aplicable:
Instrucciones de uso
Silla de ruedas eléctrica RX3

Español

Índice

1	Introducción.....	2
2	Descripción del producto.....	3
2.1	Unidad de control principal de la silla RX3.....	3
2.2	Mando a distancia Bluetooth.....	4
3	Seguridad.....	5
3.1	Indicaciones generales de seguridad.....	5
3.2	Seguridad durante el uso por un acompañante.....	5
3.3	Problemas de conexión.....	6
4	Emparejamiento del mando a distancia Bluetooth.....	7
4.1	Requisitos.....	7
4.2	Realización del emparejamiento.....	8
5	Manejo.....	12
5.1	Control de la RX3 con el mando Bluetooth.....	12
5.2	Ajuste de la velocidad.....	12
5.3	Uso de la bocina.....	13
5.4	Apagado del mando a distancia Bluetooth.....	13
6	Solución de problemas.....	14
7	Sustitución de las pilas del mando Bluetooth.....	15
8	Limpieza y almacenamiento.....	16
9	Eliminación.....	17

1 Introducción

Estas instrucciones de uso complementarias describen el emparejamiento y el manejo del mando a distancia Bluetooth de la silla de ruedas eléctrica RX3.

El mando a distancia Bluetooth es un elemento de control inalámbrico adicional. El control principal de la silla de ruedas eléctrica RX3 se sigue realizando mediante la unidad de control principal instalada de forma permanente y equipada con joystick.

También deben observarse las instrucciones de uso completas de la silla de ruedas eléctrica RX3. En ellas se explica que la silla se maneja mediante la unidad de control principal, que incluye, entre otros elementos, el interruptor de encendido/apagado, la bocina, la iluminación, los botones de velocidad y el joystick.



NOTA

Esta guía rápida no sustituye las instrucciones de uso completas de la silla de ruedas eléctrica RX3. Lea y observe las instrucciones de uso completas de la RX3 antes de utilizar el mando a distancia Bluetooth.

2 Descripción del producto

2.1 Unidad de control principal de la silla de ruedas eléctrica RX3

La silla de ruedas eléctrica RX3 se maneja normalmente mediante la unidad de control principal instalada de forma permanente.

La unidad de control principal sirve para encender y apagar la silla de ruedas eléctrica RX3, mostrar información y controlar el movimiento mediante el joystick. Los botones de función permiten, entre otras cosas, accionar la bocina y aumentar o reducir la velocidad máxima.

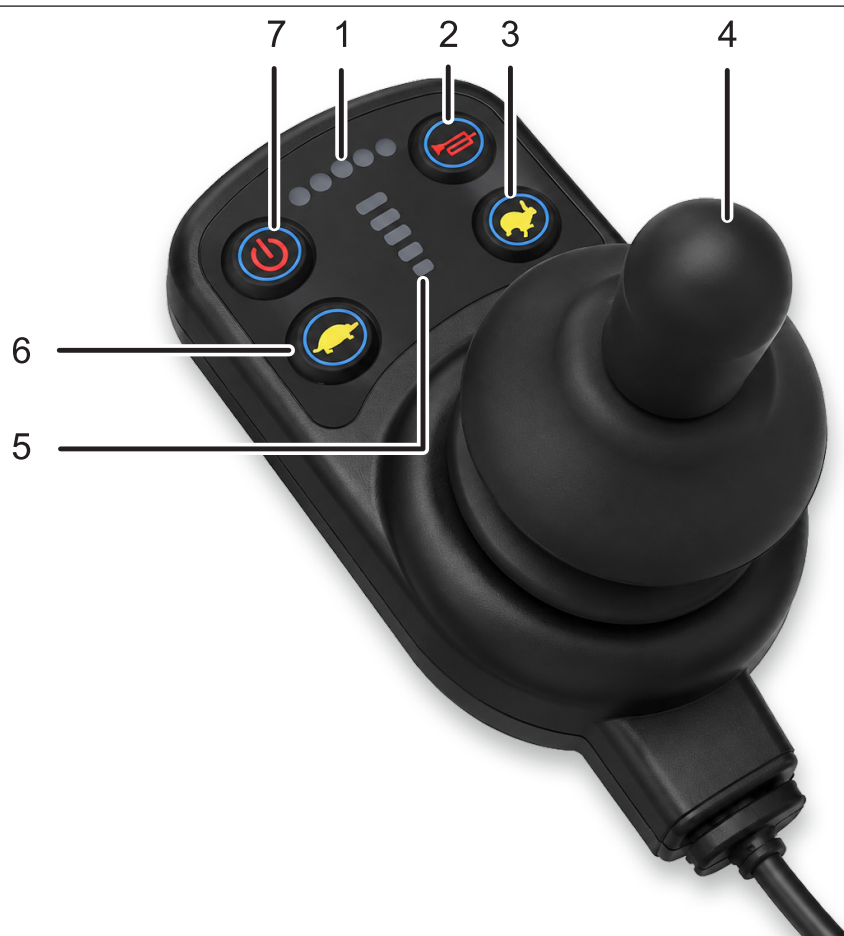


Figura 1: Unidad de control principal

- | | |
|--|--|
| 1 Indicador LED del nivel de carga de la batería | 5 Indicador LED del nivel de velocidad |
| 2 Botón de la bocina | 6 Botón para reducir el nivel de velocidad |
| 3 Botón para aumentar el nivel de velocidad | 7 Interruptor de encendido/apagado |
| 4 Joystick | |



NOTA

Para emparejar el mando a distancia Bluetooth se necesitan especialmente el botón «Reducir el nivel de velocidad» (6), el botón de la bocina (2) y el interruptor de encendido/apagado (7) de la unidad de control principal.

22 Mando a distancia Bluetooth

El mando a distancia Bluetooth permite controlar de forma inalámbrica determinadas funciones de la silla de ruedas eléctrica RX3.

Tras un emparejamiento correcto, la dirección y la velocidad de la silla de ruedas eléctrica RX3 pueden controlarse mediante el mando a distancia Bluetooth.

El mando a distancia Bluetooth se sostiene en la mano. No está montado de forma permanente en la silla de ruedas eléctrica.

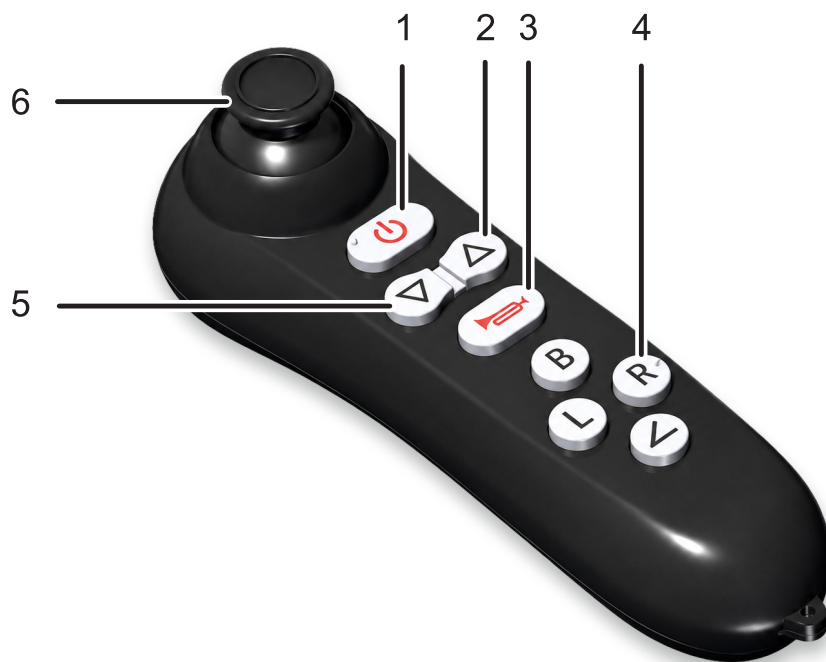


Figura 2: Mando a distancia Bluetooth

- | | |
|--|---------------------|
| 1 Botón de encendido/apagado | 5 Reducir velocidad |
| 2 Aumentar velocidad | 6 Joystick |
| 3 Botón de la bocina | |
| 4 Otros botones, p. ej. B / L / R / Fold
(no aplicables a la RX3) | |



NOTA

El mando a distancia Bluetooth está diseñado como mando universal. Según el modelo del producto, algunos botones pueden tener funciones diferentes o carecer de función. En la silla de ruedas eléctrica RX3 solo están habilitadas las funciones descritas en estas instrucciones de uso complementarias.

3 Seguridad

3.1 Indicaciones generales de seguridad



ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones por movimiento involuntario

Tras el emparejamiento, la silla de ruedas eléctrica RX3 puede moverse mediante el mando a distancia Bluetooth. Un accionamiento involuntario puede provocar colisiones, caídas o lesiones.

- Utilice el mando a distancia Bluetooth únicamente cuando pueda ver toda la zona de circulación.
 - Mantenga una distancia suficiente respecto a personas, animales, muebles, paredes, puertas, escaleras, rampas y bordillos.
 - Mantenga el mando a distancia Bluetooth fuera del alcance de los niños.
 - No coloque el mando de forma que los botones puedan pulsarse accidentalmente.
 - Apague la silla de ruedas eléctrica RX3 cuando no utilice el mando a distancia Bluetooth.
-

3.2 Seguridad durante el uso por un acompañante

Un acompañante puede utilizar el mando a distancia Bluetooth para mover la silla de ruedas eléctrica RX3 de forma controlada.



ADVERTENCIA

Riesgo de colisión y caída durante el uso por un acompañante

La respuesta de conducción con el mando a distancia Bluetooth puede diferir del manejo mediante la unidad de control principal. Especialmente ante pequeñas irregularidades, existe el riesgo de calcular incorrectamente los movimientos de la silla.

- El acompañante debe sostener el mando a distancia Bluetooth con una mano.
 - Con la otra mano, debe sujetar la silla de ruedas eléctrica RX3 por el asa de empuje o el bastidor.
 - Utilice el mando a distancia Bluetooth únicamente a baja velocidad.
 - Ajuste la velocidad como máximo al nivel 2 cuando utilice el mando a distancia Bluetooth.
 - Utilice el mando únicamente sobre una superficie nivelada, seca y despejada.
 - No lo utilice en escaleras, bordillos, rampas, pendientes pronunciadas ni terrenos irregulares.
 - Reduzca la velocidad al maniobrar, circular marcha atrás y en espacios estrechos.
 - No utilice el mando si la silla de ruedas eléctrica RX3 responde con retraso o de forma irregular.
-



NOTA

Sujetar la silla de ruedas eléctrica RX3 con una mano ayuda a percibir mejor su movimiento, especialmente al maniobrar o pasar por pequeñas irregularidades.

3.3 *Problemas de conexión*



NOTA

Bluetooth es una conexión por radio. Los teléfonos móviles, equipos de radio, routers Wi-Fi u otras fuentes de radio pueden afectar a la conexión. Las instrucciones de uso de la RX3 indican que los dispositivos Bluetooth y otras fuentes de radio pueden causar interferencias electro-magnéticas.

Deje de utilizar el mando a distancia Bluetooth si:

- la conexión es inestable,
- la silla de ruedas eléctrica RX3 responde con retraso,
- la silla de ruedas eléctrica RX3 responde de forma irregular,
- el mando a distancia Bluetooth no responde claramente a las órdenes.

En este caso, apague la silla de ruedas eléctrica RX3 y utilice la unidad de control principal.

4 Emparejamiento del mando a distancia Bluetooth

El mando a distancia Bluetooth debe emparejarse con la unidad de control principal de la silla de ruedas eléctrica RX3 antes del primer uso.

4.1 Requisitos

Antes del emparejamiento deben cumplirse los siguientes requisitos:

- La silla de ruedas eléctrica RX3 se encuentra sobre una superficie nivelada y despejada.
- No hay personas, animales ni obstáculos en la zona de circulación.
- El mando a distancia Bluetooth está cerca de la unidad de control principal.
- Las pilas del mando a distancia Bluetooth tienen carga suficiente.
- Las palancas de freno están en el modo automático A. Las instrucciones de uso de la RX3 describen este modo como aquel en el que el control electrónico está activo y el freno electromagnético se activa al soltar el joystick.



PRECAUCIÓN

Movimiento inesperado durante la prueba de funcionamiento

Tras el emparejamiento, la silla de ruedas eléctrica RX3 puede moverse mediante el mando a distancia Bluetooth.

- Compruebe primero el funcionamiento a baja velocidad.
 - Ajuste la velocidad como máximo al nivel 2.
 - Pruebe preferiblemente el mando sin una persona sentada o con especial precaución en una zona libre y nivelada.
-

42 Realización del emparejamiento



Figura 3: Unidad de control principal y mando a distancia Bluetooth durante el emparejamiento

Siga estos pasos para emparejar el mando a distancia Bluetooth con la silla de ruedas eléctrica RX3:



1. Encienda la silla de ruedas eléctrica RX3 mediante la unidad de control principal.
→ La pantalla de la unidad de control principal se ilumina.



2. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado del mando a distancia Bluetooth hasta que se encienda.
→ El indicador luminoso del mando se ilumina en verde.



3. Mantenga pulsado el botón «Reducir velocidad» del mando a distancia Bluetooth.
→ El botón de encendido/apagado del mando se ilumina en rojo y parpadea.
4. Suelte el botón en cuanto el indicador rojo empieza a parpadear.
5. Deje el mando a distancia Bluetooth a un lado durante unos instantes.



6. Mantenga pulsado el botón «Reducir la velocidad máxima» de la unidad de control principal.
→ El símbolo Bluetooth de la unidad de control principal empieza a parpadear.



7. En cuanto parpadee el símbolo Bluetooth de la unidad de control principal, pulse rápidamente el botón de la bocina.
→ La unidad de control principal se apaga automáticamente.



8. Vuelva a tomar el mando a distancia Bluetooth.
9. Pulse el botón de encendido/apagado del mando a distancia Bluetooth.
→ El indicador luminoso del mando se ilumina en verde.

10. Vuelva a encender la unidad de control principal de la silla de ruedas eléctrica RX3.



11. El emparejamiento ha finalizado cuando el símbolo Bluetooth aparece en la unidad de control principal y el mando responde a las órdenes.
12. Compruebe cuidadosamente el funcionamiento del mando a distancia Bluetooth en un entorno seguro.



5 Manejo

5.1 Control de la silla de ruedas eléctrica RX3 con el mando Bluetooth

Tras el emparejamiento, la dirección y la velocidad de la silla de ruedas eléctrica RX3 pueden controlarse mediante el mando a distancia Bluetooth.

Proceda del siguiente modo:

1. Asegúrese de que la silla de ruedas eléctrica RX3 esté encendida.
2. Asegúrese de que el mando a distancia Bluetooth esté encendido y emparejado.
3. Asegúrese de que no haya personas, animales ni obstáculos en la zona de circulación.
4. Ajuste la velocidad como máximo al nivel 2.
5. Sostenga el mando a distancia Bluetooth con una mano.
6. Con la otra mano, sujete la silla de ruedas eléctrica RX3 por el asa de empuje o el bastidor.
7. Mueva con cuidado el joystick en la dirección de marcha deseada.
8. Suelte el joystick para detener el movimiento.
9. Reduzca la velocidad al maniobrar, circular marcha atrás y en espacios estrechos.

Para el control normal mediante joystick, las instrucciones de uso de la RX3 explican que este se utiliza para avanzar, retroceder y dirigir, y que el movimiento se reduce y se detiene cuando el joystick vuelve a la posición neutra.

5.2 Ajuste de la velocidad

- Pulse «Aumentar velocidad» para aumentar la velocidad.
- Pulse «Reducir velocidad» para reducir la velocidad.



PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones por velocidad excesiva

Para acompañar de forma segura y transportar de manera controlada a una persona sentada, la velocidad no debe ajustarse por encima del nivel 2 al utilizar el mando a distancia Bluetooth.

- Utilice el mando a distancia Bluetooth únicamente a baja velocidad.
- Reduzca la velocidad antes de las curvas, al circular marcha atrás y en espacios estrechos.
- Adapte siempre la velocidad al entorno y a las condiciones del suelo.

5.3 *Uso de la bocina*

Pulse el botón de la bocina del mando a distancia Bluetooth para emitir una señal acústica de advertencia.



NOTA

La bocina no sustituye la obligación de comprobar toda la zona de circulación y prestar atención a personas, animales y obstáculos.

5.4 *Apagado del mando a distancia Bluetooth*

1. Detenga por completo la silla de ruedas eléctrica RX3.
2. Pulse el botón de encendido/apagado del mando a distancia Bluetooth.
→ El mando a distancia Bluetooth se apaga.



NOTA

El mando a distancia Bluetooth se apaga automáticamente tras aproximadamente 3 minutos de inactividad.

6 Solución de problemas

Problema	Posible causa	Medida
El mando a distancia Bluetooth no se enciende	Pilas descargadas o insertadas incorrectamente	Comprobar o cambiar las pilas
El emparejamiento no funciona	El mando no está en modo de emparejamiento	Repetir el emparejamiento
El símbolo Bluetooth no aparece	Emparejamiento incompleto	Apagar y encender la unidad de control principal; repetir el emparejamiento
La silla de ruedas eléctrica RX3 responde con retraso	Conexión inestable / interferencia de radio	Dejar de utilizar el mando a distancia Bluetooth
La silla de ruedas eléctrica RX3 no responde	Conexión interrumpida / pilas con poca carga	Comprobar las pilas; volver a emparejar
Comportamiento de conducción inusual	Fallo del control	Apagar la silla RX3 y contactar con el distribuidor especializado



ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones en caso de fallo del control

Si la silla de ruedas eléctrica RX3 responde con retraso, de forma irregular o inesperada:

- Deje de utilizar el mando a distancia Bluetooth.
- Detenga la silla de ruedas eléctrica RX3 si es posible.
- Apague la silla de ruedas eléctrica RX3 mediante la unidad de control principal.
- Contacte con el distribuidor especializado si el problema persiste.

Las instrucciones de uso de la RX3 también indican que, en caso de fallo, se debe detener y apagar la silla de ruedas eléctrica y contactar con el distribuidor si el problema persiste.

7 Sustitución de las pilas del mando a distancia Bluetooth

Cambie las pilas si:

- el mando a distancia Bluetooth no puede encenderse,
- el indicador luminoso no se enciende,
- disminuye el alcance,
- la conexión se vuelve inestable,
- la silla de ruedas eléctrica RX3 responde con retraso.

Proceda del siguiente modo:

1. Apague el mando a distancia Bluetooth.
2. Abra el compartimento de las pilas situado en la parte posterior del mando.
3. Retire las pilas descargadas.
4. Inserte pilas AAA nuevas respetando las marcas de polaridad.
5. Cierre el compartimento de las pilas.
6. Compruebe el funcionamiento del mando a distancia Bluetooth en un entorno seguro.



NOTA

Daños por pilas insertadas incorrectamente

- Respete las marcas de polaridad del compartimento de las pilas.
 - No utilice pilas dañadas.
 - No mezcle distintos tipos de pilas.
 - Retire las pilas si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado.
-

8 Limpieza y almacenamiento

Limpie el mando a distancia Bluetooth con un paño limpio, suave y seco.

Guarde el mando a distancia Bluetooth en un lugar seco, protegido del polvo y fuera del alcance de los niños.



NOTA

Daños causados por la humedad

- No limpie el mando a distancia Bluetooth con agua.
 - No sumerja el mando a distancia Bluetooth en líquidos.
 - No utilice un limpiador de alta presión.
 - No utilice productos de limpieza agresivos.
-


9 Eliminación

Deseche el mando a distancia Bluetooth y las pilas de acuerdo con la normativa local aplicable.



NOTA

El mando a distancia Bluetooth y las pilas no deben desecharse con los residuos domésticos. Deposite las pilas en puntos de recogida adecuados y los componentes electrónicos en instalaciones de eliminación autorizadas.

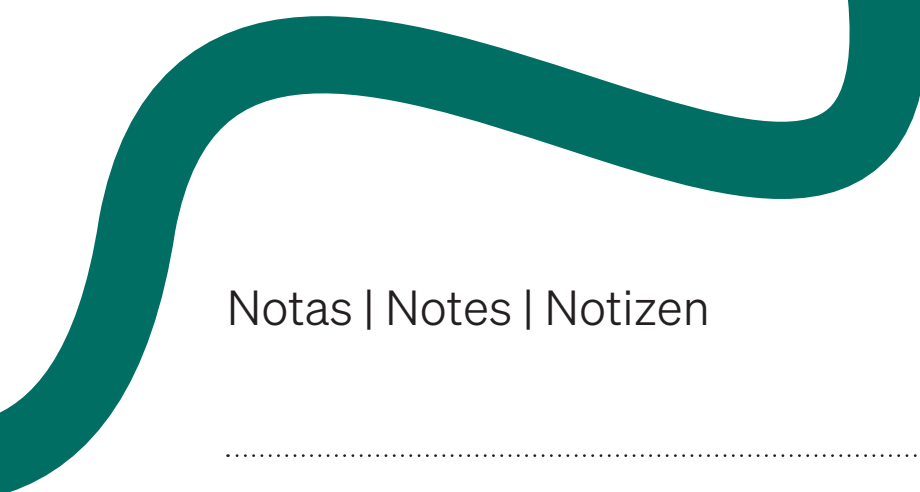

Notas | Notes | Notizen



Estas instrucciones de uso complementarias se aplican al mando a distancia Bluetooth utilizado con la silla de ruedas eléctrica RX3.

La silla de ruedas eléctrica RX3 está clasificada como producto sanitario de clase I conforme al Reglamento (UE) 2017/745.

Sujeto a modificaciones técnicas. No se acepta responsabilidad por errores ni erratas de impresión.

Las ilustraciones pueden diferir del producto real.

Pueden producirse variaciones de color debidas al proceso de impresión. Todas las dimensiones y los pesos son aproximados.